

STIMPON® STIMPON® + STIMPON® Elektrode Vaginalelektrode für EMG Biofeedback

Zur Benutzung als Vaginalelektrode für EMG Biofeedback bei Frauen.
Nur für den individuellen Gebrauch bestimmt.

SPEZIFIKATION

STIMPON® Elektrode:

Dreipolige Elektrode aus PP (Polypropylen) und medizinischem Edelstahl.
Kabellänge: ca. 30 cm
Anschlüsse: 3 x 2 mm Buchse

STIMPON®:

Tampon aus PVA (Polyvinylalkohol)

LIEFERUMFANG

STIMPON® Elektrode **REF: 100083**
STIMPON® **REF: 100120**
Gebrauchsanweisung

ANWENDUNG



ACHTUNG: Dies ist **keine** Gebrauchsanweisung. Eine ausführliche Gebrauchsanweisung mit Sicherheitshinweisen liegt jedem Produkt bei.

STIMPON® wird in warmem Wasser weichgeknetet und ausgewrungen. Die Stifte der STIMPON® Elektrode in die Vertiefungen des STIMPONS stecken. Elektrode mit Gerätekabel des Anwendungsgerätes verbinden, dabei ist auf farbliche Übereinstimmung von Stecker und Buchse zu achten. STIMPON® kann mit Elektrodengel gleitfähiger gemacht werden.

Elektrode erst **nach dem Einführen** an das Behandlungsgerät anschließen.

STIMPON® mit der Markierung [A] nach oben zeigend vorsichtig in die Scheide einführen. STIMPON® nach jeder Benutzung durch Ziehen am Kabel [B] entfernen, vom STIMPON® lösen und wie beschrieben reinigen.

REINIGUNG UND LAGERUNG (für den individuellen Gebrauch)

Nach jeder Anwendung muss die Elektrode mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel abgewaschen, gut abgespült und abgetrocknet werden. Zur Lagerung bis zur nächsten Anwendung soll die Elektrode zurück in die Verpackung gegeben und an einem sauberen Ort aufbewahrt werden.

Der STIMPON® ist ein Einmalprodukt und kann nicht wiederverwendet werden.

